

PORTA-VACUNAS MOD 3504/UN

▶ DATOS GENERALES:

El **Porta-Vacunas Thermos** ha sido desarrollado específicamente para el transporte de **VACUNAS, PLASMA Y OTROS PRODUCTOS BIO-MÉDICOS**. La efectividad de uso es resultado del diseño y técnicas de fabricación empleadas que permiten el acarreo de sustancias sensibles a variaciones de temperatura por periodos de tiempo prolongados, aún en los climas mas tropicales.

▶ CARACTERÍSTICAS:

- 1.- Altamente aislado con Poliuretano, material que garantiza su máxima eficiencia.
- 2.- Moldeado en plástico de alto impacto que asegura su durabilidad.
- 3.- Fuerte asa que permite el cierre hermético del producto en dos posiciones: Para transporte o para almacenamiento.
- 4.- Su forma cuadrada permite su apilamiento.
- 5.- Equipado con 4 Ice - Packs de tapa enroscable.
- 6.- Capacidad interior de 4.35 lts. (aprox.) sin Ice Pack.



THERMOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PORTAVACUNAS

Capacidad Interior	4.35 Lts.
Peso lleno	5.1 kgs.
Peso vacío	2.5 kgs.
Superficie externa	Polietileno
Recubrimiento interno	Polietileno
Material aislante	40 cms.
Dimensiones externas	24 x 24 x 33 cms.
Dimensiones internas	15 x 15 x 19 cms.
Dimensiones de capacidad para vacunas	10 x 10 x 18 cms.
Tapa	Removible
Nº de Ice Packs	4
Retención de temperatura (prod. cerrado)	Hasta 48 horas a temperatura de +32°C Hasta 34 horas a temperatura de +43°C
Retención de temperatura (prod. abierto)	30 horas a +32°C

TEMPERATURAS NECESARIAS - PRINCIPALES VACUNAS

B.C.G. Tuberculosis	0° - 8°, sin congelarse, una vez abierta se debe utilizar entre 4 y 6 horas siguientes
D.P.T. Triple(Difteria, Tétano y Polio)	A. Liofilizada (en polvo sin reconstituir): Hasta 20° B. Reconstituida: 0°-8° (no congelada)
ANTIPOLIO (via oral-gotas)	-15° - -25° Debe estar siempre congelada. Se debe descongelar para utilizarla manteniendola entre 0° - 8° (no congelada) Se puede mantener a temperatura estable de 1 a 3 meses.



*PRUEBA DE LABORATORIO

